

Patienteninfo

BEGO PMMA Splint und
BEGO PMMA Splint E –
Aufbisschienen

Sehr geehrte/r Patient/-in,

im Folgenden finden Sie hilfreiche Tipps zur Benutzung, Pflege, Reinigung und Lagerung Ihrer Aufbisschiene.

Die Aufbisschiene ist auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt und biologisch verträglich.

Bitte tragen Sie Ihre Schiene:

Nachts

Ganztägig

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Therapie!

Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr Praxisteam gerne zur Verfügung.

Wichtige Information

Durch regelmäßiges Tragen der Schiene können funktionsbedingte Veränderungen (z.B. Trübungen/Verfärbungen oder deutliche Abrasionsspuren) auftreten. In diesen Fällen kann eine Reparatur oder Neuanfertigung der Schiene notwendig sein. Die Überwachung des Schienenzustandes sollte im Rahmen Ihrer Therapie durch eine regelmäßige Begutachtung in der Zahnarztpraxis erfolgen.



Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Gewährleistung der dauerhaften Funktion Ihrer Schiene:



Benutzung

Vor dem Einsetzen der Schiene:

- Putzen Sie Ihre Zähne
- Spülen Sie die Schiene gründlich mit kaltem Wasser ab

Während des Tragens der Schiene:

- Nehmen Sie keine Speisen und Getränke zu sich, es besteht sonst Bruchgefahr der Schiene

Optional:

- Zur Erhöhung des Komforts beim Einsetzen sollte die Schiene vorher für mind. 20 sek in warmes Wasser gelegt werden



Pflege und Reinigung

Nach dem Tragen der Schiene:

- Spülen Sie die Schiene gründlich mit kaltem Wasser ab und reinigen die Innen- und Außenseiten mit einer Zahnbürste



Bitte vermeiden Sie die Reinigung mit:

- Zahnpasta oder Prothesenreinigungsmittel
- Reinigungsmitteln mit Farbstoffen z. B. Mundwasser
- Alkoholhaltigen Reinigern
- Haushaltsreinigern oder Scheuermitteln
- Kochendem Wasser
- Ultraschallgeräten und Reinigungsverfahren, die über 35°C hinausgehen



Lagerung

In der Zeit zwischen den Tragezyklen sollte die Schiene unter Lichtausschluss trocken bei Raumtemperatur gelagert werden. Sie können die Bisschiene in der ggf. übergebenen Kunststoffbox von BEGO (ohne Schaumstoffeinleger) aufbewahren. Um hier eine erhöhte Keimansammlung zu vermeiden, beachten Sie bitte, dass die Bisschiene bei Lagerung weiterhin trocken bleibt bzw. erst vor dem Tragen abgespült wird!

Stempel des Zahnarztes

www.bego.com

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen

Telefon +49 421 2028-280 · Fax gebührenfrei unter 0800 23 46 46 5

E-Mail material.lab@bego.com · www.bego.com

BEGO Medical GmbH

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany

Telefon +49 421 2028-280 · Fax gebührenfrei unter 0800 23 46 46 5

E-Mail cadcam@bego.com · www.bego.com