



Inklusive  
Drehmoment-  
angaben

Übersicht

# BEGO SCHNITTSTELLEN

Stand  
Februar 2025

Miteinander zum Erfolg



# ECHT. GUT. INFORMIERT.

**Mit den BEGO eNews sind Sie auch in Sachen CAD/CAM-Implantatprothetik immer auf dem neuesten Stand!**

Melden Sie sich für den kostenlosen BEGO Newsletter an und erhalten Sie immer die aktuellste Übersicht der **BEGO Schnittstellen und Prothetik-Komponenten und CADPositioner**. Weiterhin informieren wir Sie stets über das aktuelle BEGO Produkt- und Serviceportfolio sowie über Fortbildungen, Messen und Veranstaltungen.

#### Interessiert?

Dann abonnieren Sie unseren Newsletter unter:  
<https://www.bego.com/de/aktuelles/anmelden/>

Sie wollen direkt einen Blick auf die aktuellen Übersichten werfen?  
Dann scannen Sie einfach die unten stehenden QR-Codes mit Ihrem Smartphone ein.



Schnittstellenübersicht



Übersicht Prothetik-Komponenten  
und CADPositioner

# MITEINANDER ZUM ERFOLG

Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad\*- und 3Shape\*-Anwender verfügbar.

- 1) In Abweichung zur BEGO/ELOS Titanbasis wird die Original-Klebebasis beigelegt.
- 2) Neben den durch BEGO Medical angebotenen Klebebasen sind Original-Komponenten wahlweise nutzbar. Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

Schnittstellenübersicht

Implantatdurchmesser	Prothetische Schnittstelle	CADAbut Duo für Einzelzahnversorgungen mit Rotationsschutz und abgewinkeltem Schraubenkanal bis zu 29°								
		CADAbut Full			CADAbut Duo für Einzelzahnversorgungen mit Rotationsschutz und abgewinkeltem Schraubenkanal bis zu 29°					
		BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	ANG**	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® YZ® ST <sup>Color</sup> / VITA® YZ® ST <sup>MultiColor</sup>	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+

Serie 0.1 BEGO Implant Systems – Semados® S-Implantat – PM-Line (Platform Match) – Sub-Tec

3.25	3.67	✓	✓
3.75	3.67	✓	✓
4.1	4.1	✓	✓
4.5	4.5	✓	✓
5.5	5.5	✓	✓
Abutment	Multi <sup>Plus</sup>		

Serie 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini

3.5	3.5		
-----	-----	--	--

Serie 0.5 BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX/RS/R SX/RI – PS-Line und Esthetic Line Prothetik

3.0	3.0	✓	✓
3.25	3.67	✓	✓
3.75	3.67	✓	✓
4.1	4.1	✓	✓
4.5	4.5	✓	✓
5.5	5.5	✓	✓
Abutment	Multi <sup>Plus</sup>		

Serie 1.1 kompatibel zu Straumann Standard Plus / Tapered Effect / synOcta\*

3.3; 4.1; 4.8	RN	✓	✓	√2)
6.5	WN	✓	✓	✓
Abutment	synOcta			

\* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.  
 \*\* ANG = Angulierter Schraubenkanal  
 Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realität abweichen.

CADAbut Duo für Brücken und Stege ohne Rotationsschutz und abgewinkeltem Schraubenkanal bis zu 29°						CADBase/CADBar Brücken und Stegversorgungen			CADAbut Duo auf Abutment Niveau für Brücken und Stegversorgungen mit Titan-Klebebasis					
BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® YZ® ST <sup>Color</sup> / VITA® YZ® ST <sup>MultiColor</sup>	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	ANG*	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® YZ® ST <sup>Color</sup> / VITA® YZ® ST <sup>MultiColor</sup>	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	ANG*

	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ab 2. Quartal 2025 erhältlich

	✓													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ab 2. Quartal 2025 erhältlich

	✓	✓												
	✓	✓												
	✓	✓												
	✓	✓												

\* ANG = Angulierter Schraubenkanal



Sofern nicht anders gekennzeichnet, sind die aufgeführten Versorgungen für die entsprechenden Implantatsysteme für exocad\*- und 3Shape\*-Anwender verfügbar.

- 1) In Abweichung zur BEGO/ELOS Titanbasis wird die Original-Klebebasis beigelegt.
- 2) Neben den durch BEGO Medical angebotenen Klebebasen sind Original-Komponenten wahlweise nutzbar. Die erforderlichen Original-Komponenten sind bitte beim jeweiligen Hersteller zu beziehen.

Schnittstellenübersicht

Implantatdurchmesser	Prothetische Schnittstelle	CADAbut Duo für Einzelzahnversorgungen mit Rotationsschutz und abgewinkeltem Schraubenkanal bis zu 29°								
		CADAbut Full			CADAbut Duo für Einzelzahnversorgungen mit Rotationsschutz und abgewinkeltem Schraubenkanal bis zu 29°					
		BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	ANG**	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® YZ® ST <sup>Color</sup> / VITA® YZ® ST <sup>MultiColor</sup>	KATANA® Zirkonia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+

**Serie 3.3** kompatibel zu Nobel Biocare Außensechskant-Verbindung / Brånemark / NobelSpeedy / NobelSpeedy Groovy\*

3.3	3.5 NP	✓				✓			
3.75; 4.0	4.3 RP	✓				✓			
5.0	5.1 WP					✓			
Abutment	Multi-unit (MU)								

**Serie 3.4** kompatibel zu Nobel Biocare Multi-unit Abutment\*

Abutment	Multi-unit (MU)								
----------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Serie 5.1** kompatibel zu DENTSPLY Implants EV Prothetik / ASTRA TECH EV / DS OmiTaper EV / DS PrimeTaper EV\*

3.0 S	3.0					✓			
3.5 S	3.5	✓				✓			
4.0 S	3.5	✓				✓			
4.5	4.0	✓				✓			
5.0	4.0	✓				✓			
5.0 S	4.0	✓				✓			
Abutment	UniAbutment Abutment 20°								
Abutment	UniAbutment Abutment 45°								

**Serie 5.2** kompatibel zu DENTSPLY Implants ASTRA ASTRA TECH OsseoSpeed EV

3.0	XS	✓				✓2)			
3.6	S	✓				✓2)			
4.2	M	✓				✓2)			
4.8	L	✓				✓2)			
5.4	XL	✓				✓2)			

\* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.  
 \*\* ANG = Angulierter Schraubenkanal  
 Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen können von der Realität abweichen.

CADAbut Duo für Brücken und Stege ohne Rotationsschutz und abgewinkeltem Schraubenkanal bis zu 29°						CADBase/CADBar Brücken und Stegversorgungen			CADAbut Duo auf Abutment Niveau für Brücken und Stegversorgungen mit Titan-Klebebasis					
BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® YZ® ST <sup>Color</sup> / VITA® YZ® ST <sup>MultiColor</sup>	KATANA® Zirkonia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	ANG*	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® YZ® ST <sup>Color</sup> / VITA® YZ® ST <sup>MultiColor</sup>	KATANA® Zirkonia YML	BEGO PMMA Multicolor	ANG*

		✓				✓								
		✓				✓								
		✓				✓								
						✓								

						✓								
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Ab 4. Quartal 2025 erhältlich														
								✓						
								✓						
								✓						
								✓						
								✓						

Ab 2. Quartal 2025 erhältlich														

\* ANG = Angulierter Schraubenkanal



## Anzugsdrehmoment Prothetikschrabe

Implantatdurchmesser	Gerader Schraubenkanal (0°) einteilig	Gerader Schraubenkanal (0°) zweiteilig (Kleebasis)	Abgewinkelter Schraubenkanal CADBase	Abgewinkelter Schraubenkanal CADAbut Duo
<b>Serie 0.1 BEGO Implant Systems – Semados® S-Implantat – PM-Line (Platform Match) – Sub-Tec</b>				
S3.25/S3.75/S4.1/S4.5/S5.5	30 Ncm	30 Ncm	25 Ncm	–
<b>Serie 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini</b>				
2.7/2.9/3.1	25 Ncm	–	20 Ncm	–
<b>Serie 0.3 BEGO Implant Systems – Semados® MultiPlus</b>				
Abutment Niveau (MultiPlus)	20 Ncm	–	–	–
<b>Serie 0.5 BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX/RS/R SX/RI – PS-Line und Esthetic Line Prothetik</b>				
RS/R SX 3,0	20 Ncm	20 Ncm	15 Ncm	–
SC/SCX 3,25	30 Ncm	30 Ncm	25 Ncm	–
SC/SCX/S-TG/RS <sup>Pro</sup> /R SX <sup>Pro</sup> /RI 3.75/4.1/4.5/5.5	30 Ncm	30 Ncm	25 Ncm	–
<b>Serie 1.1 kompatibel zu Straumann Standard Plus / Tapered Effect / synOcta*</b>				
3.3; 4.1; 4.8; 6.5	35 Ncm	–	25 Ncm	35 Ncm
Abutment Niveau 3.3; 4.1 RN; 4.8	15 Ncm	15 Ncm	–	–
<b>Serie 1.2 kompatibel zu Straumann BoneLevel* (CrossFit® Verbindung)</b>				
3.3; 4.1; 4.8	35 Ncm	–	20 Ncm	35 Ncm
<b>Serie 1.4 kompatibel zu Straumann BLX* (TorcFit® Verbindung)</b>				
3.0	15 Ncm	–	–	15 Ncm
3.5; 4.0	20 Ncm	–	–	20 Ncm
4.5; 5.0	25 Ncm	–	–	25 Ncm
<b>Serie 3.1 kompatibel zu Nobel Biocare NobelActive* / NobelParallel CC / Nobelreplace CC</b>				
3.5; 4.3; 5.0	25/35 Ncm	–	–	35 Ncm
<b>Serie 3.2 kompatibel zu Nobel Biocare NobelReplace*</b>				
3.5; 4.0; 4.3; 5.0; 6.0	35 Ncm	–	25 Ncm	35 Ncm
<b>Serie 3.3 kompatibel zu Nobel Biocare Außensechskant-Verbindung / Bränemark / NobelSpeedy / NobelSpeedy Groovy*</b>				
3.3; 3.75; 4.0; 5.0	–	35 Ncm	–	35 Ncm
<b>Serie 3.4 kompatibel zu Nobel Biocare Multi-unit Abutment*</b>				
Abutment Niveau	15 Ncm	15 Ncm	–	–
<b>Serie 5.1 kompatibel zu DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed / OsseoSpeed TX*</b>				
3,5; 4,0	20 Ncm	25 Ncm	–	25 Ncm
4,5; 5,0	25 Ncm	–	–	25 Ncm
<b>Serie 5.2 kompatibel zu DENTSPLY Implants EV Prothetik / ASTRA TECH EV / DS OmiTaper EV / DS PrimeTaper EV*</b>				
3,0; 3,6; 4,2; 4,8; 5,4	–	–	–	25 Ncm
Abutment Niveau	15 Ncm	15 Ncm	–	–

\* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.

## Anzugsdrehmoment Prothetikschrabe

Implantatdurchmesser	Gerader Schraubenkanal (0°) einteilig	Gerader Schraubenkanal (0°) zweiteilig (Kleebasis)	Abgewinkelter Schraubenkanal CADBase	Abgewinkelter Schraubenkanal CADAbut Duo
<b>Serie 6.1 kompatibel zu Zimmer Dental Tapered Screw-Vent*</b>				
3,7; 4,1; 4,7; 6,0	30 Ncm	–	–	30 Ncm
<b>Serie 8.1 kompatibel zu CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE / PROGRESSIVE-LINE / ROOT-LINE*</b>				
3,3; 3,8; 4,3	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm	–
5,0; 6,0	20 Ncm	20 Ncm	25 Ncm	–
Abutment Niveau	15 Ncm	–	–	–
<b>Serie 8.2 kompatibel zu CAMLOG CONELOG SCREW-LINE*</b>				
3,3; 3,8; 4,3; 5,0	20 Ncm	20 Ncm	–	–
<b>Serie 11.1 kompatibel zu Neoss ProActive*</b>				
3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5	32 Ncm	30 Ncm	–	35 Ncm
<b>Serie 16.1 kompatibel zu Medentis ICX-Active-Master / ICX Premium</b>				
3,75; 4,1; 4,8	30 Ncm	30 Ncm	–	–
<b>Individuelle Abheilpfosten</b>				
BEGO CADAbut Full, BEGO CADAbut Duo	15 Ncm	–	–	–

\* Die folgenden Zeichen sind geschäftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehören.



Die kostenfreie Garantieleistung

**BEGO Security Basic**

Versorgungsart	Material	Dauer	Leistung
<b>Modul „CAD/CAM Kronen und Brücken“</b>			
Kronen und Brücken	Metall	30 Jahre	kostenfreier Ersatz des Produktes
	Keramik	5 Jahre	kostenfreier Ersatz des Produktes
<b>Modul „CAD/CAM-Implantatprothetik“</b>			
Abutments	Metall	lebenslang	kostenfreier Ersatz des Abutments, ggf. Kostenübernahme bei Schraubenfraktur bis zu 1.200,- €, ggf. Materialkosten des Implantats
	Zirkon	5 Jahre	kostenfreier Ersatz des Abutments, ggf. Kostenübernahme bei Schraubenfraktur bis zu 1.200,- €, ggf. Materialkosten des Implantats
Stege	Metall	lebenslang	kostenfreier Ersatz der Stege, ggf. Kostenübernahme bei Schraubenfraktur bis zu 1.200,- €, ggf. Materialkosten des Implantats
Brücken	Metall	lebenslang	kostenfreier Ersatz der Brücken, ggf. Kostenübernahme bei Schraubenfraktur bis zu € 1.200,- €, ggf. Materialkosten des Implantats
<b>Modul „CAD/CAM-Modellguss“</b>			
Modellgussgerüste	Metall	5 Jahre	kostenfreier Ersatz des Produktes

Bei Fragen zur Abwicklung und/oder unseren kostenfreien BEGO Security Basic Lösungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**Für weitere Fragen zur BEGO Security Basic**

CAD/CAM-Beratung	Telefon	+49 421 2028-200
	E-Mail	cadcam@bego.com



**Kennen Sie schon  
BEGO Security Plus?**

Mehr Infos unter:





[www.bego.com](http://www.bego.com)

**BEGO Medical GmbH**

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany  
Tel. +49 421 2028-200 · Fax gebührenfrei unter 0800 2346465  
E-Mail [cadcam@bego.com](mailto:cadcam@bego.com) · [www.bego.com](http://www.bego.com)

**BEGO Scan- und Designcenter Nord**

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany  
Tel. +49 421 2028-210  
E-Mail [design@bego.com](mailto:design@bego.com) · [www.bego.com](http://www.bego.com)

**BEGO Scan- und Designcenter Süd**

Max-Planck-Str. 7 · 85716 Unterschleißheim, Germany  
Tel. +49 89 200703 99

**Immer alle BEGO News im Blick haben?**

Hier direkt zum Newsletter anmelden: [www.bego.com/newsletter](http://www.bego.com/newsletter)



Bitte beachten Sie, dass je nach behördlicher Zulassung nicht alle unsere Produkte und Dienstleistungen in jedem Land verfügbar sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen BEGO Repräsentanten.  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen auf Grundlage unserer Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (AGB), welche jederzeit auf [www.bego.com](http://www.bego.com) abrufbar sind und auf Wunsch gerne übersandt werden.